




ABENA Fix

Brugervejledning - Fiksering

Pasform - et vigtigt element for lækagebeskyttelse

ABENA har et bredt udvalg af fikseringsbukser til at matche forskellige brugergrupper, og vores sortiment dækker også behovet for store størrelser.

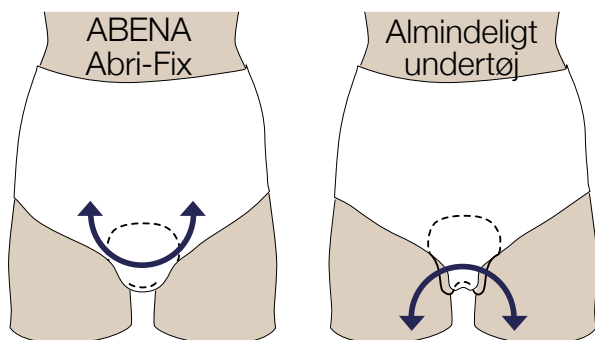


- Sammenlignet med almindeligt undertøj er ABENA fikseringsbukser bredere i skridtet og har større elasticitet, der giver en maksimal blestøtte og den bedste beskyttelse mod lækager.
- ABENA San-produkter i størrelse 5-11 anbefales at bruges i kombination med speciale fikseringsbukser for at sikre en tætsiddende pasform og optimal beskyttelse mod lækager.

Hoftemål

For at sikre en optimal fiksering og en god pasform er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse. Den afgørende faktor er hoftemålet, som skal måles med målebånd det sted, hvor hoften er bredest.

Hver størrelse kan matche flere forskellige hoftemål, og vi anbefaler, at du vælger en størrelse, hvor hoftemålet dækkes. To størrelser kan dække samme hoftemål. I dette tilfælde vælges den størrelse, hvor brugerens hoftemål er mest i midten.

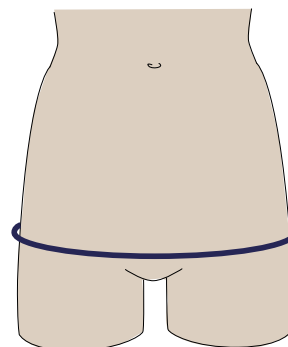

Farvekode

Farvekoderne gør det let at finde den rigtige størrelse i ABENA Abri-Fix-produkterne hver gang. Farvekoden ses i linningen på alle størrelser og på emballagen.

XS	→	Red
S	→	Yellow
M	→	Blue
L	→	Brown
XL	→	Green
2XL	→	Orange
3XL	→	White
4XL	→	Grey
5XL	→	Black
6XL	→	Purple